

# Provtagnings och packningsanvisning för Prostata, mellannålar

## 1 Provtagning

### 1.1 Material

Under själva provtagningen behövs följande material:


- Pads/eget val av filterpapper.
- 40mL burkar fyllda med färgad 4% buffrad formaldehydlösning. Förvaring i rumstemperatur samt ej i direkt solljus.

För beställning av provtagningsmaterial: <https://estore.loomis.se>

### 1.2 Handhavande vid provtagning

För bästa handläggning ska det endast vara en biopsi/burk.

1. Lägg mellannålsbiopsin **så rakt som möjligt** på pads.
2. Lägg pads med biopsin i korrekt uppmärkt burk.  
**OBS: Viktigt att proverna läggs ned i formaldehyd omedelbart efter provtagning.**
3. Stäng burken noggrant. Skaka ej. Dubbelkolla att locket är påskruvat korrekt, för att undvika läckage.
4. Sätt etiketten lodrätt på burken, se bild.
5. Proverna förvaras i rumstemperatur.

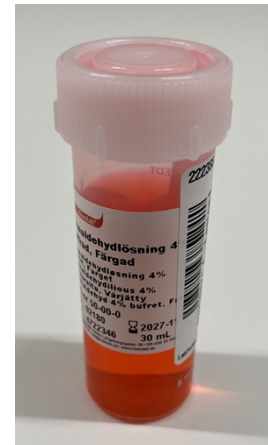

Figur 1. Burk med färgad formaldehydlösning

## 2 Packa provet rätt

### 2.1 Material

För att packa provet behövs följande material:

- En transportväska (IniCase) med insats och förslutningsbar engångspåse per 12 burkar
- en plombering per IniCase

För beställning av transportmaterial: <https://estore.loomis.se>

### 2.2 Handhavande vid packning av prov

Observera att Plomberings-ID (ex. IL12345) skall vara registrerat i remissen för att vi ska kunna spåra provet på patientnivå. Se [Remissanvisning](#) för mer information.

1. Öppna IniCase och ställ ned samtliga burkar i patientfallet med locket uppåt.
2. Förslut engångspåsen genom att dra bort tejpén och tryck ihop påsen.
3. Dra igen dragkedjan och plombera IniCasen med korrekt plombering.
4. I väntan på upphämtning ska proverna förvaras i rumstemperatur.



Figur 2. IniCase packad med provrör och förslutningsbar engångspåse

## 3 Jag har stött på ett problem?

### 3.1 Mitt patientfall innehåller fler än 12 rör?

1. Registrera in två Plomberings-ID i remissen enligt instruktioner i [Remissanvisning](#).
2. Fyll två IniCase med prover och plombera med de två korrekta plomberna.
3. Sätt ett gummiband runt de IniCase som tillhör samma patientfall.

### 3.2 Plomberat med fel plomb

1. Plombera om IniCase. Plombera med korrekt plomb om möjligt.
2. Om det ej är möjligt - ta en plomb som ej är registrerad i remissen. Om möjligt ändra Plomberings-ID i remissen.
3. Om remissen redan är ivägskickad - skicka in patientfallet med en oregistrerad plomb. Lägg plomben i en ficka inuti Inicase.

### 3.3 Plomberat rätt IniCase men glömde en burk

1. Bryt upp plomberingen.
2. För över patientfallet samt den glömda burken till ett nytt IniCase, då engångspåsen ej går att återförsluta.
3. Ta ett nytt plomberings-ID och plombera IniCase.
4. Låt det första Inicaset gå med transporten öppen och tom med den förbrukade plomberingen i en ficka under locket inuti IniCase.

Vid frågor:

[support@inify.com](mailto:support@inify.com)